

アナフィラキシー補助治療剤
(アドレナリン自己注射薬)
を処方された方向け



スマートフォンアプリ「マイエピ」 利用マニュアル



マイランEPD合同会社
(2021年1月)

ご不明の点がございましたら、
こちらの電話番号までご連絡ください。

エピペンカスタマーサポートセンター

0120-303-347 (無料)

(月～土9時～18時 日祝祭日を除く)

目次

はじめに

1. はじめ方
2. 利用者ステータスの設定
3. ユーザー登録

各種機能

1. ノート機能
 1. タグの登録・削除
 2. 記録
 3. 閲覧
 4. PDF化
2. ライブラリー
3. Q&A
4. アナフィラキシー補助治療剤（アドレナリン自己注射薬）関連機能
 1. エピペン緊急時音声ナビ
 2. エピペンの使い方
 3. エピペン交換時期のお知らせ（重要なお知らせ通知プログラム）
 4. 携帯し忘れ防止アラーム


その他

1. 利用者ステータスの変更

1. はじめ方



画面を右にスワイプし、「はじめる」をタップします。

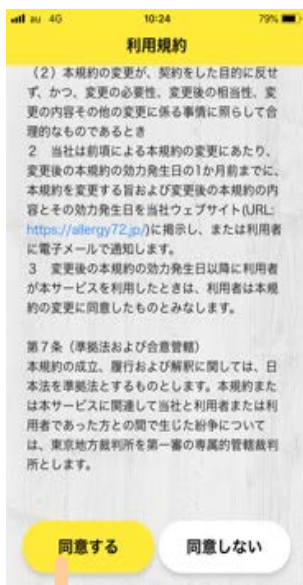

利用規約を確認し、「同意する」をタップします。


2. 利用者ステータスの設定



利用者ステータスを選択します。

- ・アナフィラキシー補助治療剤（アドレナリン自己注射薬）を処方された方

3. ユーザー登録

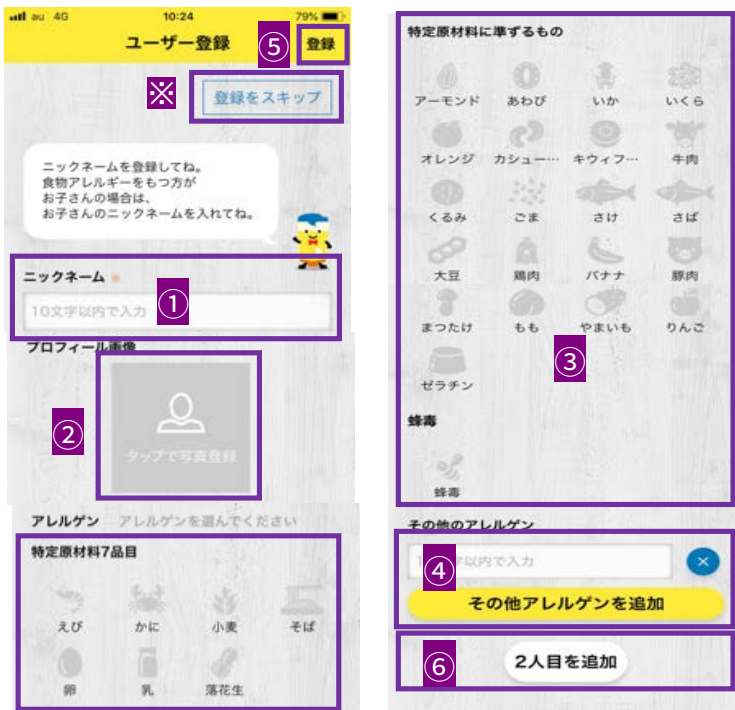

①ニックネーム（入力必須項目）

10文字以内で入力します。

②プロフィール画像

スマホ内に保存された画像、あるいはその場で撮影した画像で登録します。

③アレルギー

原因アレルギーを選択します。複数のアレルギーを登録できます。

④その他のアレルギー

ご自身の原因アレルギーが③にない場合、アレルギーを入力します。

⑤登録

上記項目を入力後、「登録」をタップします。

⑥2人目を追加

2人目以降を追加したい場合は、「2人目を追加」をタップします。最大5人まで登録できます。

※登録をスキップ

後で登録することも可能です。

登録せずにアプリを使用することもできますが、ノート機能を利用するにはユーザー登録が必須です。


ノート機能は、食事内容、症状の発現状況、服薬などの治療内容や検査結果などを写真とともに記録できます。また、記事内容を印刷したり、メールで共有することもできます。記録した内容を診察時に主治医に見てもらおうと良いでしょう。
※ユーザー登録後、ノート機能を利用できるようになります。

1. タグの登録・削除

タグとは分類ラベルのことをいいます。

あらかじめ記録をタグ付けしておく、あとで記録を振り返るときに便利です。

はじめは「症状記録」、「食事記録」が登録されており、最大5つまで登録できます。

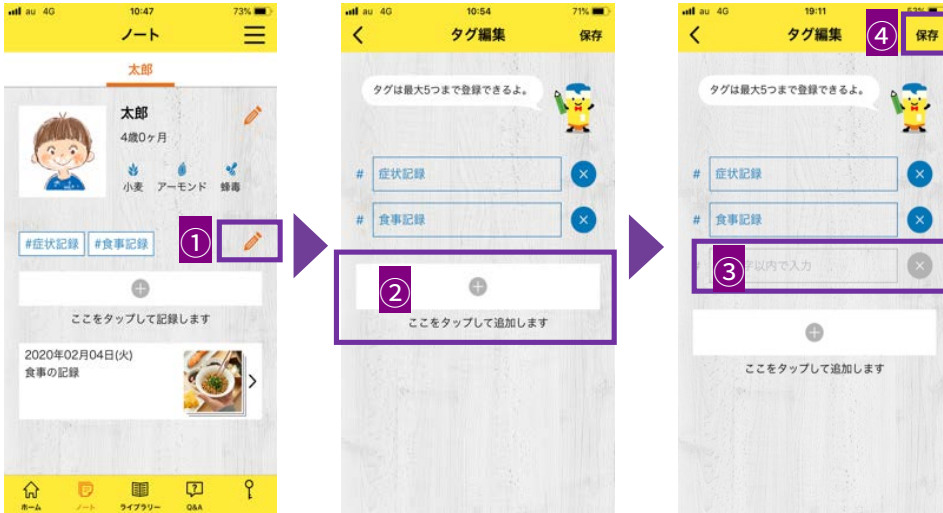


- ①ノート画面のえんぴつアイコンをタップします。
- ②「+」をタップします。
- ③10文字以内で入力します。
- ④「保存」をタップします。




※タグを削除する場合は「X」をタップし、「保存」をタップします。

2. 記録

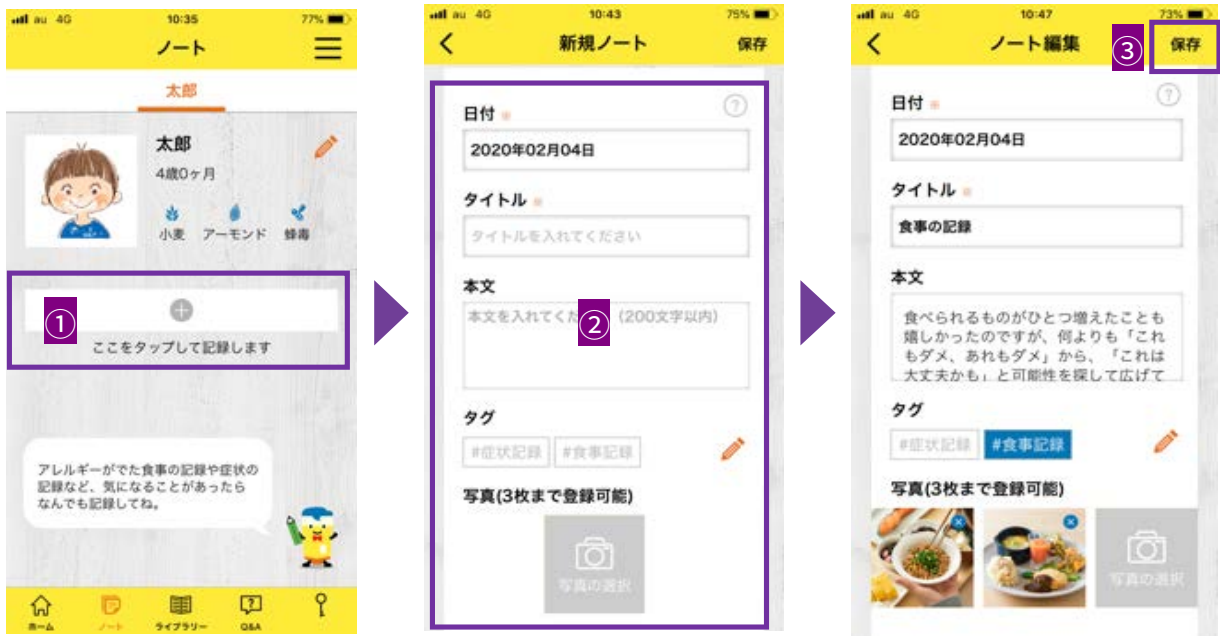

- ① 「+」をタップします。
- ② 新規ノートに、日付、タイトル、本文を入力し、タグを選択、写真を追加します。
- ③ 「保存」をタップします。


3. 閲覧

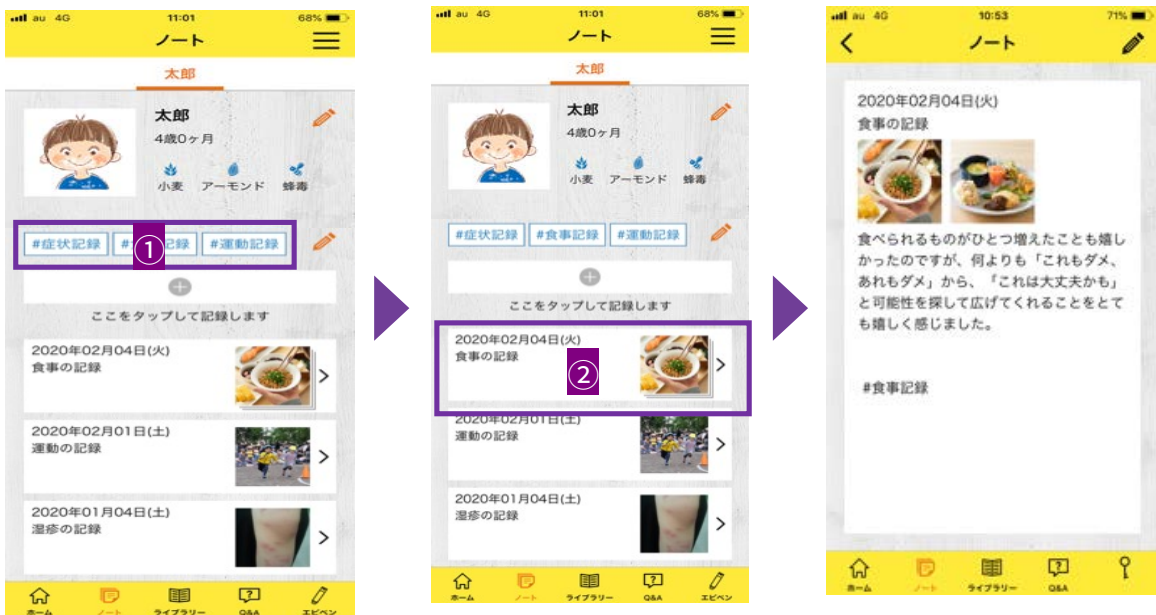

- ① タグをタップします。
- ② タグ付けされた記録の一覧から、見たい項目をタップします。

4. PDF化

(iPhoneの場合)

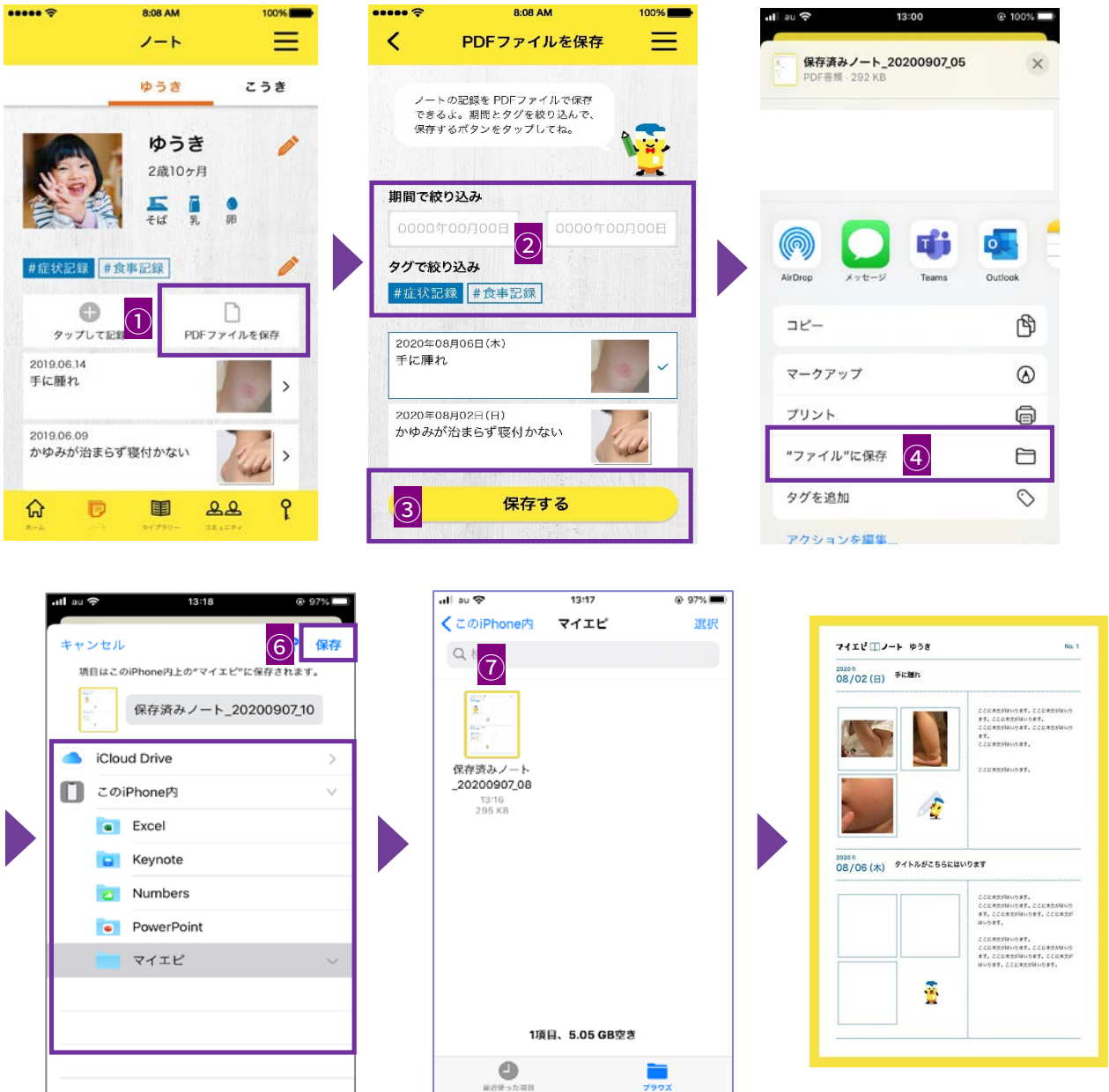

- ① 「PDFファイルを保存」をタップします。
- ② 期間やタグで絞り込みます。
- ③ 「保存する」をタップします。
- ④ 「ファイルに保存」をタップします。
- ⑤ 保存先を指定します。
(例では、あらかじめ作成しておいた「マイエビ」を指定しています。)
- ⑥ 「保存」をタップします。
- ⑦ 指定した保存先を開くと、PDFファイルが保存されています。

4. PDF化

(Androidの場合)



- ① 「PDFファイルを保存」をタップします。
- ② 期間やタグで絞り込みます。
- ③ 「保存する」をタップします。

PDFファイルは、ドキュメントフォルダ内の「マイエピ」に保存されています。


アレルギーのしくみやアナフィラキシーになったときの対処法など正しい情報が得られます。
「アレルギーについて」、「治療について」、「病院検索」、「保育園・幼稚園・学校」、「食事」、「アレルギーポータル」、「緊急時対応マニュアル」に分類されています。



- ①分類項目をタップします。
- ②一覧から、項目をタップします。

アレルギーの原因や症状、治療などに関する疑問にお答えします。


「食物アレルギー」、「蜂毒アレルギー」、「薬物アレルギー」、「アナフィラキシー」、「アドレナリン自己注射薬」に分類されています。

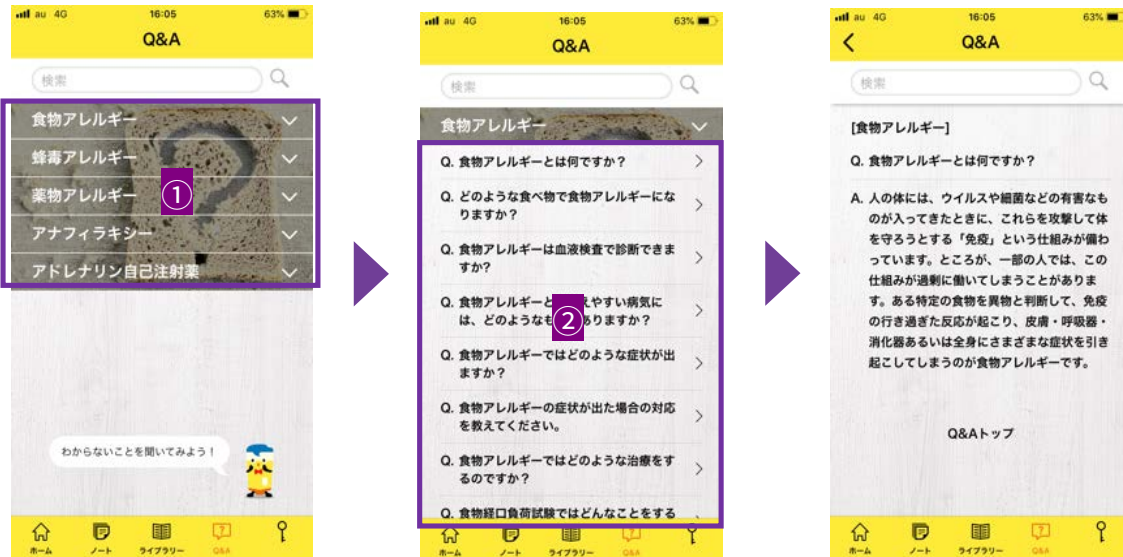

①分類項目をタップします。

②一覧から、項目をタップします。

キーワードから検索することもできます。

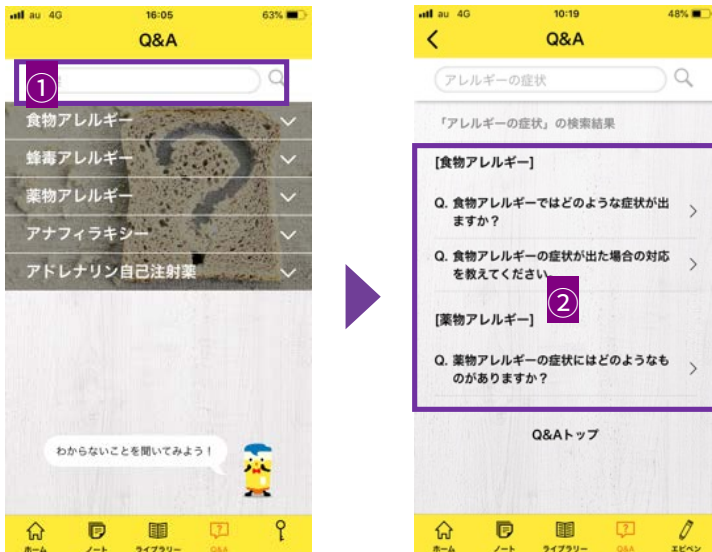

①キーワードを入力します。

②表示された関連Q&A一覧から、項目をタップします。

1. エピペン緊急時音声ナビ

アナフィラキシーが発現した時に、症状の確認、エピペンの使い方や投与後の対応などについて動画と音声でナビゲーションします。状況に合わせてお使いいただけるよう、2パターンあります。



- ①画面上部の「いまエピペンを使用する」をタップします。
 （「エピペンを使用する」という赤いボタンは、画面上部に常に表示されています。）
- ②エピペンを投与すべきか迷っており、アナフィラキシー症状を確認したい場合は、
 「症状を確認して使う」をタップします。
 今すぐエピペンを使いたい場合は、「今すぐ使う」をタップします。

2. エピペンの使い方

エピペンの使い方動画、エピペンガイドブック日本語版/英語版、エピペンサイトへアクセスし、エピペンについていつでも最新の正しい情報を得ることができます。



3. エピペン交換時期のお知らせ（重要なお知らせ通知プログラム）

エピペンには使用期限があります。マイエピから「重要なお知らせ通知プログラム」※に登録するとメールとプッシュ通知で交換時期のお知らせを受け取ることができます。

※従来のハガキ、ウェブサイト「エピペンサイト」に加え、マイエピからも登録できるようになりました。



交換時期の約1ヶ月前になると、メールとプッシュ通知が届きます。さらに、3週間前、2週間前、1週間前にプッシュ通知が届きます。（エピペンを返却登録すると、プッシュ通知は届かなくなります。）

3. エピペン交換時期のお知らせ（重要なお知らせ通知プログラム）

新規登録



- ① 「エピペン新規追加」をタップします。
- ② メールアドレス、パスワードを入力します。
- ③ 処方されたエピペンの規格「0.3mg」、「0.15mg」を選択します。
- ④ 製品情報の「写真を選択」をタップし、製品本体もしくは外箱に記載されている製造番号および使用期限の写真を保存します。
- ⑤ 自動で製造番号と使用期限が読み込まれるので、確認します。
- ⑥ 「確認」をタップします。




※2本目以降を登録する場合は、「エピペン追加」をタップし、同様の手順で登録します。

3. エピペン交換時期のお知らせ（重要なお知らせ通知プログラム）

登録情報の連携（エピペンサイトからすでに登録済みの方はこちら）

すでにエピペンサイトから「重要なお知らせ通知プログラム」に登録済みのユーザーの場合は、登録情報をアプリと連携することができます。

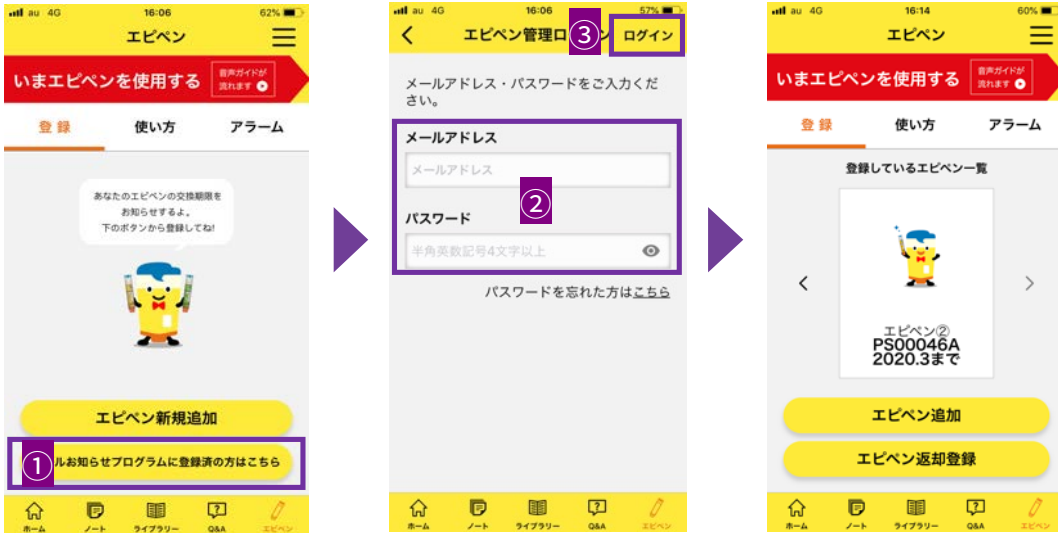

- ① 「メールお知らせプログラムに登録済みの方はこちら」をタップします。
- ② 登録しているメールアドレスとパスワードを入力します。
- ③ 「ログイン」をタップします。

返却登録

エピペンの使用期限が切れ、医療機関に返却した際、返却登録を行います。



- ① 「エpiペン返却登録」をタップします。
- ② 返却登録するエpiペンを選択します。
- ③ 「選択したエpiペンを返却済みにする」をタップします。

3. エピペン交換時期のお知らせ（重要なお知らせ通知プログラム）

エピペン登録の上限について

重要なお知らせ通知プログラムで登録できるエピペンは累計10本までです。

（「返却登録」を行っても11本目の登録はできません。）

11本以上登録する場合には、他のメールアドレスで登録するか、エピペンカスタマーサポートセンター（0120-303-347）へご連絡ください。



4. 携帯し忘れ防止アラーム


エピペンは、アナフィラキシーに備えて、常に携帯する必要があります。携帯し忘れ防止アラームで曜日と時間を設定すると、プッシュ通知でお知らせを受け取ることができます。



- ①携帯し忘れ防止アラームの右にある「+」をタップします。
- ②アラーム時間、曜日を設定します。
- ③「確認」をタップします。
- ④「OK」をタップします。

1. 利用者ステータスの変更

利用者ステータスは、いつでも変更することができます。

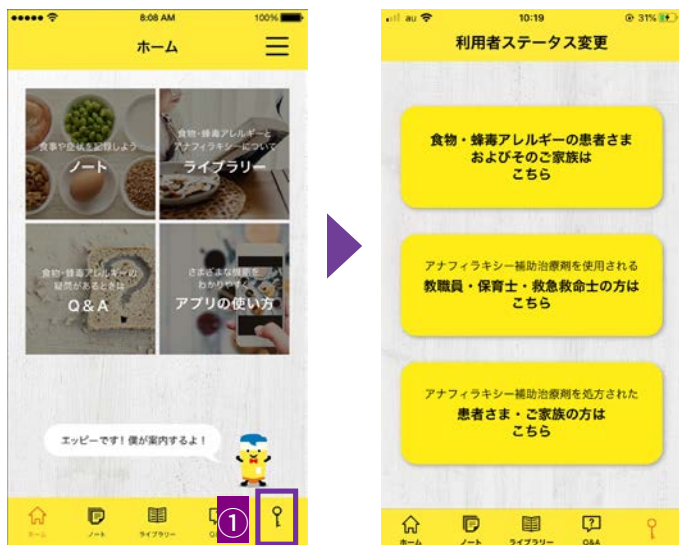


①右下の鍵マークをタップします。

②利用者ステータス変更画面が表示されますので、該当する利用者属性をタップします。

2. お問い合わせ先

お問い合わせにつきましては、「エピペンカスタマーサポートセンター」へご連絡ください。

エピペンカスタマーサポートセンター

 0120-303-347 (無料)

(月～土 9時～18時 日祝祭日を除く)